

# OP-Handschuhe steril

## Anleitung zum An- und Ausziehen



<b>Indikationen</b>	Sterile OP-Handschuhe sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und werden bei operativen Eingriffen und pflegerischen Maßnahmen verwendet, wenn Sterilität erforderlich ist.
<b>Wechselintervall</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nach jeder Operation;</li> <li>➤ nach Beendigung der jeweiligen Anwendung.</li> </ul>
<b>Anleitung zum Anziehen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führen Sie vor dem Anziehen der sterilen Handschuhe eine hygienische Händedesinfektion durch.</li> <li>2. Prüfen Sie die Verpackung auf Unversehrtheit. Öffnen Sie die unsterile Umverpackung komplett, sodass die sterile Innenverpackung auf einer sauberen und desinfizierten Arbeitsfläche ohne Berührung abgelegt werden kann.</li> <li>3. Öffnen Sie die Verpackung, indem Sie sie vorsichtig an den Ecken anfassen und ausbreiten.</li> <li>4. Entnehmen Sie den ersten Handschuh mit Daumen und Zeigefinger an der umgeschlagenen Stulpe auf.</li> <li>5. Ziehen Sie den Handschuh in einer Bewegung über die andere Hand bis zum Handgelenk hoch..</li> <li>6. Nehmen Sie den zweiten Handschuh auf, indem Sie die Finger der behandschuhten Hand in die umgeschlagene Stulpe schieben.</li> <li>7. Ziehen Sie in einer einzigen Bewegung den zweiten Handschuh an und vermeiden Sie dabei jegliche Berührung der Haut mit den sterilen Außenflächen.</li> <li>8. Wenn notwendig, passen Sie die Finger und Zwischenräume an, bis die Handschuhe richtig sitzen.</li> <li>9. Führen Sie die Finger der fertig behandschuhten Hand in die noch eingeschlagene Stulpe der anderen Hand und entfalten Sie diese vorsichtig.</li> </ol>

<p><b>Anleitung zum Ausziehen</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie den ersten Handschuh, indem Sie ihn mit den Fingern der anderen Hand abziehen. Ziehen Sie den Handschuh aus, indem sie ihn von innen nach außen bis zu den zweiten Fingergelenken rollen, aber nicht vollständig ausziehen..</li> <li>2. Halten Sie die Stulpe des halb ausgezogenen Handschuhs mit der anderen Hand fest. Entfernen sie den anderen Handschuh, indem Sie mit den Fingern der teilweise noch behandschuhten Hand in die Stulpe greifen.</li> <li>3. Ziehen Sie den Handschuh aus, indem Sie ihn von innen nach außen kehren. Achten Sie darauf, dass die ungeschützte Haut ausschließlich mit der Innenseite des Handschuhs in Berührung kommt..</li> <li>4. Entsorgen sie das entstandene „Handschuhbällchen“ (Innenseite der Handschuhe ist jetzt außen) direkt in einen bereitstehenden Abfallbehälter.</li> <li>5. Führen Sie anschließend eine hygienische Händedesinfektion durch.</li> </ol>
<p><b>Empfehlungen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bei chirurgischen Eingriffen mit erhöhtem Perforationsrisiko und/oder chirurgischen Eingriffen an Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko wird für das OP-Team das Tragen von zwei Paar übereinander gezogenen OP-Handschuhen (double gloving) empfohlen.</li> <li>➤ Bei Operationen von Patienten mit einem erhöhten Risiko für Latexallergien sollten latexfreie OP-Handschuhe verwendet werden.</li> </ul>
<p><b>Warnhinweis</b></p>	<p><b>Die behandschuhten Hände dürfen ausschließlich sterile Medizinprodukte und Flächen sowie den vorher desinfizierten Hautbereich berühren</b></p>